

Fasmedo[®] Medical Originality

FL-210 無線手術用頭燈



快速入門指南

查看更多信息請參閱網址

www.fasmedo.com 或掃描



Fasmedo



Fasprosystem



Fasmedo



1. 包裝內容



① 快速入門指南 ② FL-210 本機 ③ USB-Type C cable


④ 腰掛式電池盒(不含電池)

2. 外觀介紹

前



後

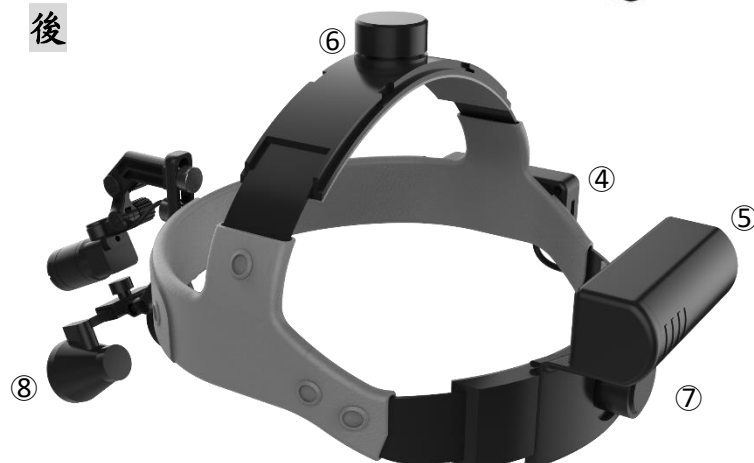

1. LED 燈筒

2. 燈筒支架組

3. 旋鈕開關

4. USB-Type C 充電插槽

5. 電池蓋

6. 鬆緊旋鈕（頭高）

7. 鬆緊旋鈕（頭圍）

8. 放大鏡（選配）

3. 充電

A. 在首次使用 FL-210 之前，請拉出貼紙



B. 在首次使用 FL-210 之前，請使用附贈的 USB Type C 電源線充電至少 4 小時。

C. 建議請勿使用其他產品的電源線。

D. 建議請勿使用電腦充電。

4. 開啟 FL-210

A. 開機：按一下旋鈕開關來開啟 FL-210，
一旦開啟，指示燈會顯示藍光。



B. LED 燈：旋轉旋鈕開關可調整 LED 燈的亮度，
順時針旋轉調亮，逆時針旋轉調暗， 亮度已經達到最大或最小值時會有聲響提示。

C. 關機：按一下旋鈕開關即可關閉 FL-210。



5. 更換電池盒(選配)

如果您想減輕頭戴重量，可以將頭帶背面的電池盒拆下，換成腰掛式電池盒。

- A. 將電池盒的電源線從連接器上拔下，然後按照指示方向用力將頭戴背面的電池盒拉起。



- B. 從電池盒中取出電池，然後將電池插入腰掛式電池盒中。

- C. 將腰掛式電池盒電源線連接到連接器插座上。



6. 電量指示燈狀態：

電池容量	指示燈號行為(放電) (●：開啟, ○：關閉, ◎：閃爍)
電池 75%~100%	● ● ●
電池 40%~74%	● ● ○
電池 20%~39%	● ○ ○
電池 0%~19%	◎ ○ ○

電池容量	指示燈號行為(充電) (●：開啟, ○：關閉, ◎：閃爍)
電池 100%	● ● ●
電池 75%~99%	● ● ◎
電池 40%~74%	● ◎ ○
電池 0%~39%	◎ ○ ○

7. 安全說明

1. 避免一直注視 FL-210 LED 燈，以免造成視力受損。
2. 建議只使用 FL-210 附贈的 USB Type C 電源線。
3. 避免將 FL-210 暴露於火或其他直接熱源下，包含吹風機，微波爐和其他設備。
4. 建議請勿因為任何原因自行拆解設備。
5. 請勿將物體強行插入您的裝置連接或按鍵。如果連接器不易插入，則可能與本裝置不相符。
6. 請勿在 FL-210 上使用噴霧清潔劑，否則可能會損壞系統。

All rights reserved©2018 Faspro Systems Co., Ltd.



TEL: +886-2-2517-0160

6F, No.160, Sec. 2, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan

<https://www.fasprosystems.com>